

Quickstart Guide: Single Switches



tash
an ableNet company


Connect Switch



Plug a single switch into any switch-adapted device with a standard, mono 3.5mm switch jack.

Note: For computer access a computer switch interface is required. (sold separately)

Press* Activation Area

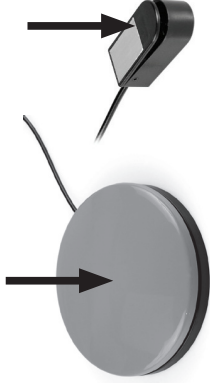

Once the activation area is pressed, any attached device will activate.

*String, Grasp, and Tip switches are activated with a pull, squeeze, or tilt, respectively.

Guía de inicio rápido: Conmutadores simples



tash
an ableNet company


Conecte el conmutador



Conecte un conmutador simple a cualquier dispositivo adaptado con un conmutador, por medio de un conector mono estándar de 3,5 mm.

Nota: Para obtener acceso a través de un ordenador se requiere un interfaz de comunicación para ordenadores, (se vende por separado)

Presione* el área de activación

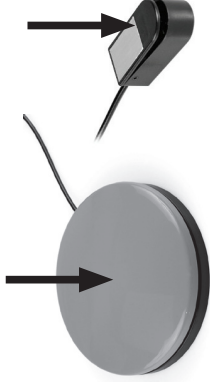

Una vez se ha presionado el área de activación, se activará cualquier dispositivo conectado.

Los conmutadores *String, Grasp, y Tip se activan estrirando, apretando o inclinando respectivamente.

Beyond the Basics

Storage and Care

Disconnect switch before cleaning with a damp cloth or alcohol.

Do not pull or wrap the cable around the switch.

Do not immerse in water or use solvents to clean.

Do not open or attempt to take apart the switch.

Do not expose switches to extreme heat or cold.

Mounting Options

AbleNet switches can be mounted in a variety of different ways. For flat surfaces and simple mounting, try Cling!™ products or Velcro®.

For complete mounting systems and connections designed just for your switch, visit our on-line store at www.ablenetinc.com. Locate your specific product's page, and click on "Related Items".

Más allá de la información básica

Almacenamiento y mantenimiento

Desconecte el conmutador antes de limpiarlo con un paño húmedo o con alcohol.

No estire ni envuelva el cable alrededor del conmutador.

No lo sumerja en agua ni utilice disolventes para limpiarlo.

No abra ni intente desarmar el conmutador.

No exponga el conmutador a temperaturas extremas de frío o calor.

Opciones de montaje

Los conmutadores AbleNet pueden montarse en una variedad de maneras diferentes. Para superficies planas y un montaje sencillo, pruebe los productos Cling!™ o Velcro®.

Para ver los sistemas de montaje completos y las conexiones diseñadas exclusivamente para su conmutador, visite nuestra tienda en Internet en www.ablenetinc.com. Localice la página de su producto específico y haga clic en "Related Items" (Artículos relacionados).

Otras características

Conmutadores Big Red y Jelly Bean:

Se puede usar una tapa a presión para conmutador (se vende por separado) para asegurar una fotografía o símbolo en los conmutadores Big Red y Jelly Bean.

Los conmutadores Big Red y Jelly Bean *twist* incluyen cuatro partes superiores de los conmutadores que se giran para retrairlas. Gire firmemente las partes superiores de los conmutadores en el sentido contrario a las agujas del reloj para retrairlas y en el sentido de las agujas del reloj para conectarlas.



Pegatinas de colores

Si el conmutador incluye pegatinas de colores, utilícelas para personalizar la apariencia.

Cubiertas de los conmutadores

Si su conmutador incluye una cubierta de tela, lávela a mano con un detergente suave cuando sea necesario.

Warranty

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return/repair information is available at www.ablenetinc.com. For more information on AbleNet products and services, contact:

AbleNet, Inc.,
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956
www.ablenetinc.com

Garantía

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos en los materiales y la fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información sobre devoluciones y reparaciones, se puede obtener en www.ablenetinc.com. Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc.,
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956
www.ablenetinc.com